

Zirkonzahn®

PRETTAU® AQUARELL



Barvení Prettau zirkonu pomocí barvicích tekutin Prettau® Aquarell



Rozsah barvicích tekutin Prettau® Aquarell v zásadě odpovídá 16 barvám pokrývajících celé barevné spektrum Vita odstínů. Jsou založeny na vodní bázi a neobsahují žádné kyseliny. Pro vizuální podporu, obsahují tyto nové tekutiny spalitelné bio-pigmenty, které pomáhají šíření reálného odstínu a barev. Individuální vlastní zbarvení jemnějších detailů, jako jsou například mamelony, cervikální a interproximální oblasti, je podstatně jednodušší a může být provedeno s dokonalou přesností.

Během sintrování se spálí bio pigmenty na 100% a výsledek vypadá velice dobře v požadované barvě zubu. Použití **Cervikálních a Intenzivních barev** dodává uměleckou dokonalost konečnému výsledku. Společně s novou barvicí tekutinou Prettau® Aquarell byla vyvinuta zjednodušená barvicí technika pro barvení předsintrovaného Prettau® Zirkonu.



Konečné barvení, před sintračním procesem



Po sintračním procesu

Potřebné vybavení



Barvící tekutina Prettau® Aquarell



Štětec bez kovového držáku pro aplikaci barvící tekutiny



Papírový kapesník pro vysušení štětce



Sušicí lampa /IF lampa/



Sintrovací pec – sintrační program č. 5

Instrukce pro skladování a aplikaci

Barvící tekutiny Prettau® Aquarell je nutné skladovat v chladu a temnu. Aby bylo dosaženo homogenního barevného výsledku, protřepejte lahvičku tekutiny před vlastním použitím. Před barvením bločku ponořte zcela štětec do barvící tekutiny a otřete přebytečné kapky do papírového kapesníku. Při výměně barvy důkladně vyčistěte štětec tekutinou.



Instrukce pro barvení frontálního zubu

Výchozí stav: vyfrézovaný zub



Krok	Barvicí tekutina	Aplikace barvy	labial	palatinal
1	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x		
4	Cervical A Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
5	Incisal blue Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	Incisal grey Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	Incisal violet Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	Orange 1 Aquarell Colour Liquid for Prettau® Brown 2 Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x 1x		

Sušení: Práci po nabarvení položíme okluzní plochou dolů na sušící destičku pod IF lampou a sušíme cca 20–40 minut v závislosti na rozměrech dané práce.

Instrukce pro barvení distálního zubu

Výchozí stav: vyfrézovaný zub



Krok	Barvicí tekutina	Aplikace barvy	buccal	occlusal
1	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x		
4	Cervical A Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x 2x 3x buccal occlusal		
5	Incisal blue Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	Incisal grey Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	Incisal violet Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	Orange 1 Aquarell Colour Liquid for Prettau® Brown 2 Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x 1x		

Sušení: Práci po nabarvení položíme okluzní plochou dolů na sušící destičku pod IF lampou a sušíme cca 20–40 minut v závislosti na rozměrech dané práce.