

Údržba "Zirkograph 025 ECO"

Manuální frézovací přístroj Zirkograph 025 ECO má minimální údržbu, frézovací ramena jsou bezúdržbová, pomocí "cooper" pasty pouze promazáváme šroubky na frézovacím stolku, ale je třeba pravidelně čistit mikromotor.

Postup při čištění mikromotoru:



a/ Odšroubovat stříbrnou krytku.



b/ Do vzkličidla vsunout pomocný nástroj



c/ Klíčem přidržel vzkličidlo a současně odšroubovat pomocným nástrojem vzkličidlo a vytáhnout ven.



d/ Vzkličidlo pročistit, stačí profouknout tlakem vzduchu (nebo pročistit přiloženou štětkou).

Vzkličidlo nepromazávat jakýmkoliv olejem či mastičkou.

Upozornění:

Je velmi důležité provádět pravidelnou údržbu mikromotoru ve frézovacím přístroji. Ve vzkličidle se může hromadit frézovaný zirkonový prášek, dojde k ucpání mikromotoru a pak fréza, která se vkládá do mikromotoru nemusí dosednou přesně až na dno a pak tímto dochází k nepřesnému frézování.

V případě neprovádění dané pravidelné údržby, pozbývá zákazník záruku na frézovací přístroj.